


Obrazový manuál pre infúzny set Accu-Chek® Insight Flex


Infúzny set Accu-Chek Insight Flex je určený na podkožnú infúziu aplikáciu inzulínu pumpou Accu-Chek Insight.

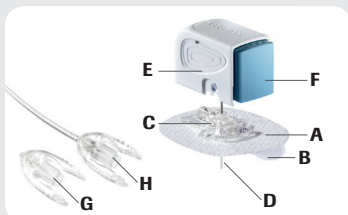


- A** Samolepiaca podložka
- B** Ochranná fólia lepiacej pásky
- C** Platnička konektora
- D** Zavádzacia ihla
- E** Ihlová kazetka
- F** Tlačidlo
- G** Zaslepovacia zátka
- H** Vodiaca súprava (hadička)



1 Pred rozbalením Vášho infúzneho setu si dôkladne umyte ruky. Zvoľte a vydezinfikujte miesto vpichu podľa pokynov Vášho lekára alebo zdravotníckeho tímu.

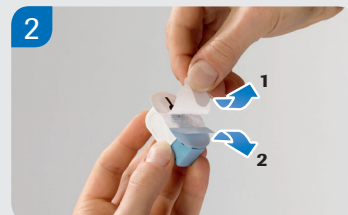

2 Odlepte obe časti lepiacej pásky zo samolepiacej podložky.

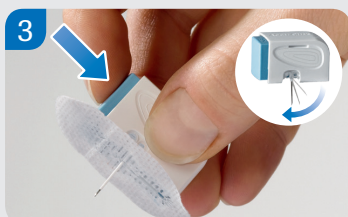


3 Tlačidlo zatlačte až na doraz. Z kazetky sa vysunie zavádzacia ihla s mäkkou kanylou.




4 Infúzny set zaveďte pod 90° uhlom. Zvoľte si miesto vpichu, ktoré nie je na páse, v blízkosti kostí, akýchkoľvek jaziev, pupka a nedávnych miest vpichu.



5 Pevne prilepte samolepiacu podložku na miesto vpichu tak, aby bola celým povrchom v styku s pokožkou.

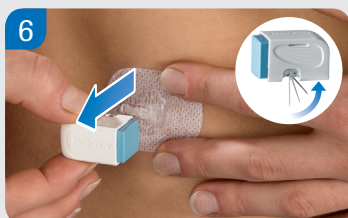

6 Odoberte ihlovú kazetku so zavádzacou ihlou. Na mieste vpichu ponechajte náplasť a platničku konektora. Zavádzacia ihla automaticky zapadne späť do kazetky.

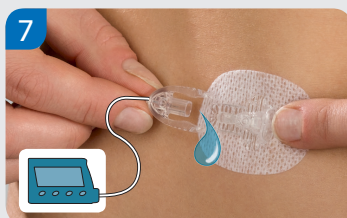

7 K inzulinovej pumpke pripojte vodiacu súpravu a pripravte ju podľa pokynov uvedených v návode na používanie inzulinovej pumpy. Uistite sa, že v hadičke sa nenachádzajú žiadne bubliny vzduchu.



8 K platničke konektora pripojte vodiacu súpravu. Pred pokračovaním liečby inzulinovou pumpou naplňte hlavicu a mäkkú kanylu bolusom 0.7 U inzulínu.

Mäkká kanyla	Dĺžka:	6 mm	8 mm	10 mm
	Plniaci objem:	0,7 E*	0,7 E*	0,7 E*
Hadička	Dĺžka:	40 cm	70 cm	100 cm
	Plniaci objem:	7 E*	11 E*	15 E*

* U 100 inzulínu

Podrobné pokyny a dôležité bezpečnostné informácie nájdete v návode k tomuto výrobku.

Tipy pre používanie infúzných setov Accu-Chek®


Preštudujte si pár užitočných informácií, ktoré Vám pomôžu pri pravidelnej výmene infúzných setov.

Volba miesta vpichu pre infúzny set:

Rôzne časti ľudského tela môžu absorbovať inzulín rôznym spôsobom

- V oblasti brucha sa inzulín absorbuje dobre s konštantnou rýchlosťou
- V oblasti stehien a zadku sa inzulín absorbuje pomalšie a jeho absorpcia sa môže zrýchliť počas fyzickej aktivity, čo môže viesť k neočakávaným hodnotám glykémie.

Oblasti vpichu pre príslušné rýchlosti absorpcie inzulínu

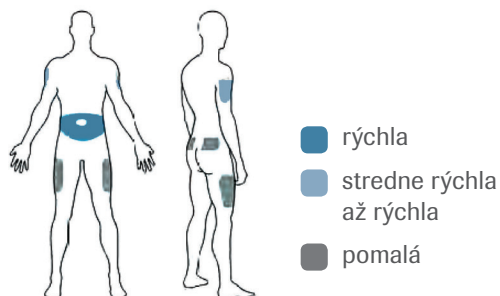

Nevhodné miesta vpichu pre podávanie inzulínu

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| ▪ 5 cm okolo pupka | ▪ Oblasti okolo kostí | ▪ Oblasti lipohypertrofie |
| ▪ Veľmi citlivé oblasti | ▪ Oblasti krvných ciev | ▪ Modriny |
| ▪ Pod oblasťou pása | ▪ Jazvy po úrazoch / chirurgické jazvy | ▪ Oblasti v blízkosti piercingu |
| ▪ Miesta vystavené odieraniu alebo nárazom | ▪ Oblasti so zmnoženým tukovým tkanivom | ▪ Tetovania |

Pokiaľ si nie ste istý, kontaktuje Vášho lekára alebo iný zdravotnícky personál!

Výmena infúznej súpravy



Kedy a prečo meniť.

- Kovovú kanylu každé 2 dni
- Teflónovú kanylu každé 3 dni
- U niektorých jedincov môže byť potrebné meniť kanylu častejšie z dôvodu vyššej citlivosti kože
- Pri každej výmene zvoľte nové miesto vpichu



Prečo meniť pravidelne?

Pokiaľ nie je infúzny set vymieňaný v odporúčaných intervaloch, existuje zvýšené nebezpečenstvo:

- Zníženej/nepredvídateľnej účinnosti inzulínu
- Vzniku infekcie (abscesov) v mieste zavedenia kanyly
- Stvrdnutia kože v mieste vpichu
- Zhrubnutie podkožného tukového tkaniva
- Upchatie ihly alebo kanyly

ACCU-CHEK a ACCU-CHEK INSIGHT sú ochranné známky spoločnosti Roche.
© 2017 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.sk
Roche Slovensko s.r.o.
Diabetes Care
Lazaretská 12
811 08 Bratislava



ACCU-CHEK®