

Prečo používať glukomer Accu-Chek® Instant

✓ Vysoká presnosť

Glukomer Accu-Chek Instant spĺňa ešte prísnejšie kritériá ako vyžaduje norma ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015^{1,2}.

✓ Jednoduché ovládanie

Ovládanie glukomera jediným tlačidlom. Ihneď vidíte poslednú hodnotu a priemery za 7, 30 a 90 dní.

✓ Ľahko čitateľný displej

Veľké čísla na podsvietenom displeji sú ľahko viditeľné za akýchkoľvek svetelných podmienok.

✓ Široká aplikačná plocha

Testovací prúžok dokáže nasať malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej aplikačnej ploche.

✓ Moderný spôsob manažmentu diabetu

Možnosť prepojenia s aplikáciou mySugr (Elektronický denník, bolusový kalkulator, zdieľanie dát v rodine a mnoho ďalších funkcií) priamo v mobile.

ACCU-CHEK®

Glukomer Accu-Chek® Instant

Súprava glukomera obsahuje:

- Lancetové pero Accu-Chek Fastclix
- Bezpečnostný zásobník so 6 lancetami
- 10 testovacích prúžkov
- Praktické puzdro



Roche



Stiahnite si aplikáciu mySugr:



Accu-Chek a Accu-Chek Instant sú ochranné známky Roche.

mySugr je registrovaná ochranná známka mySugr GmbH.

© 2019 Roche Diabetes Care

www.accu-check.sk

Roche Slovensko, s. r. o., Diabetes Care


Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bezplatná zákaznícka linka:
0800 120 200

ACCU-CHEK®

Glukomer Accu-Chek® Instant

Jednoduchá kontrola diabetu
s farebným indikátorom
cieľového rozmedzia

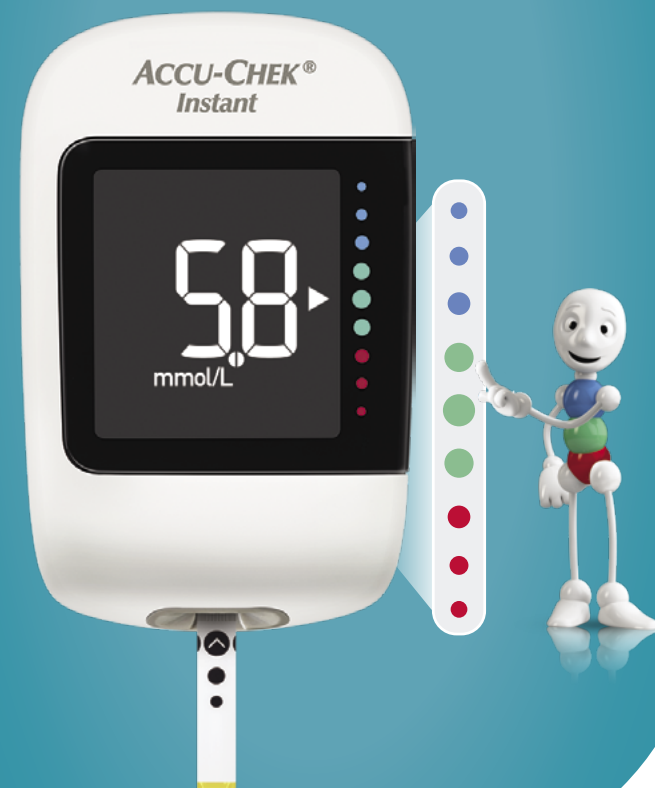


ACCU-CHEK®

Kód materiálu: 30/2019

¹ ISO 15197:2013. In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus.

² Nancy Breitenbeck et al: Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015; Journal of Diabetes Science and Technology 2017, Vol. 11(4) 854– 855.

Jednoduché, rýchle a presné meranie glykémie

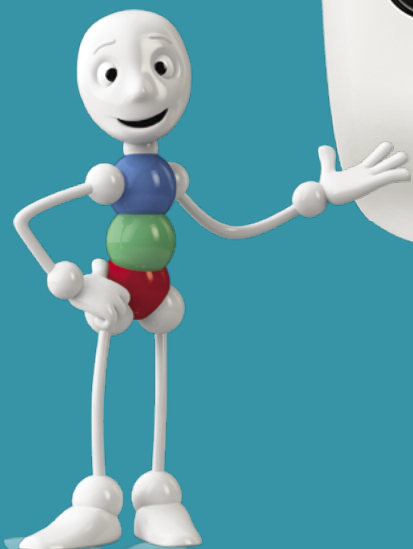

Ako pomáha farebný indikátor cieľového rozmedzia *

- pomáha okamžite a správne vyhodnotiť nameranú hodnotu glykémie
- pomáha identifikovať stupeň rizika hypoglykémie a hyperglykémie
- pomáha stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu
- pomáha zlepšiť kvalitu života pacienta a zvyšuje jeho bezpečnosť

Čo znamenajú jednotlivé hodnoty glykémie?

(9.0 - 33.3 mmol/L)	Vaša nameraná hodnota je vyššia ako cieľové rozmedzie	Nárast hladiny krvného cukru v krvi môže spôsobiť aj zvýšený stres. Pravidelné cvičenie napomáha k znižovaniu stresu.
(3.9 - 8.9 mmol/L)	Vaša nameraná hodnota je optimálna	Pre udržanie optimálnych hodnôt aj v čase vírusy alebo náhle choroby zaradte do Vášho jedálnička ľahko stráviteľné jedlá, ktoré obsahujú rovnaké množstvo kalórií.
(3.8 - 0.5 mmol/L)	Vaša nameraná hodnota je nižšia ako cieľové rozmedzie	Užite 15 g rýchlo pôsobiacich sacharidov a odmerajte si hladinu glykémie po 15 minútach. Opakujte, kým Vaša hodnota nedosiahne optimálnu hodnotu.

- Zobrazené hodnoty cieľového rozmedzia sú predvolené.
- Možnosť individuálneho nastavenia cieľového rozmedzia cez aplikáciu mySugr v mobile.
- Ak chcete zistiť, aké cieľové rozmedzie glykémie je pre vás primerané, obráťte sa na svojho ošetrojúceho lekára.

Blikajúca šípka

Upozorní v prípade, ak je nameraná hodnota mimo nastaveného cieľového rozmedzia.

ŠÚKL kódy:

D98852 glukomer Accu-Chek Instant
D98853 prúžky testovacie Accu-Chek Instant 50

* Zdroj:
Parkin CG, et al. Use of an Integrated Tool for Interpretation of Blood Glucose Data Improves Correctness of Glycemic Risk Assessment in Individuals With Type 1 and Type 2 Diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2016 Sep 12.