
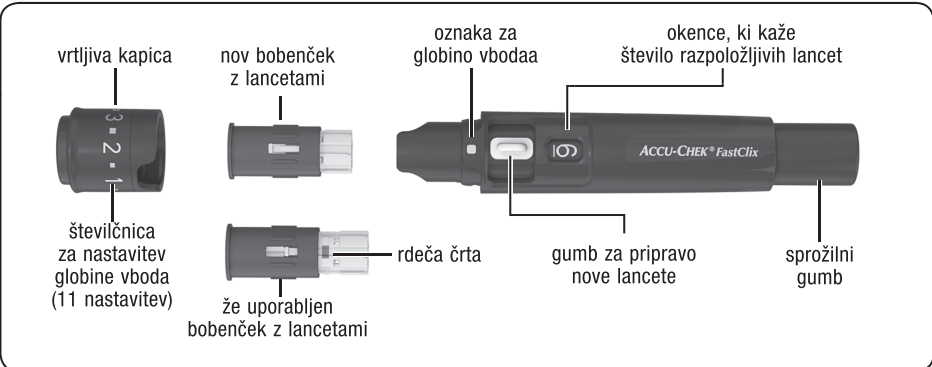
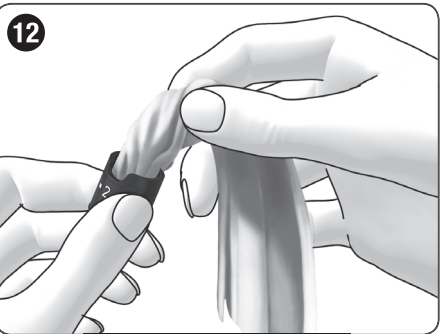
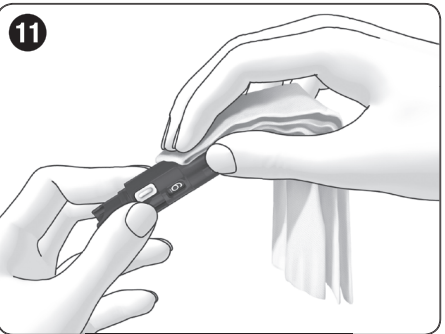
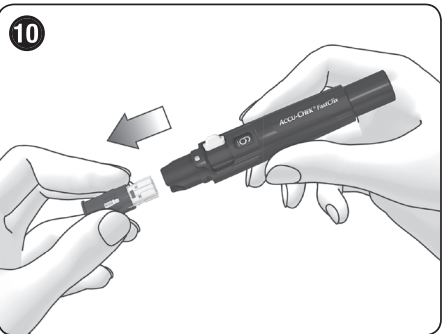
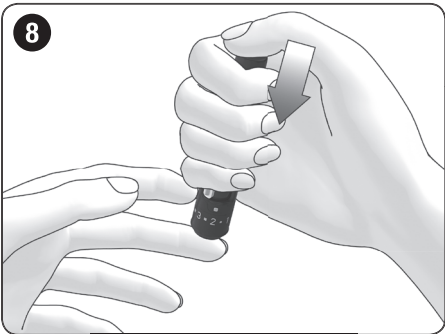
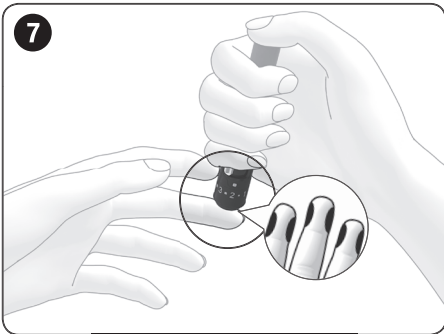
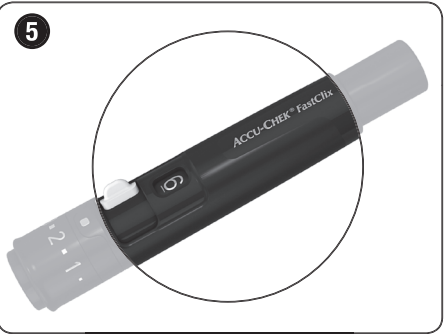
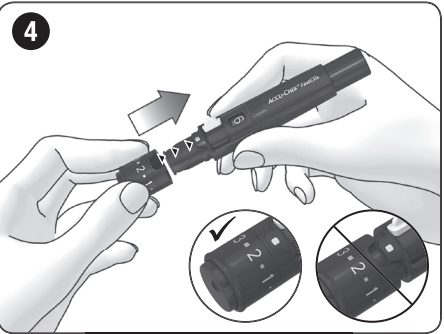
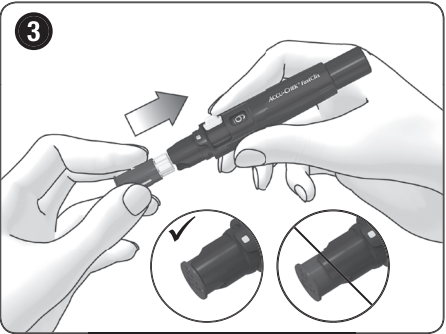


SL HR

Accu-Chek® FastClix

Sprožilna naprava
Lancetar

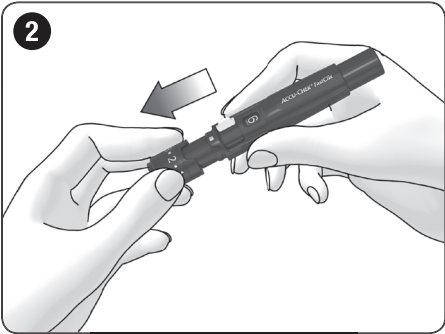

Navodila za uporabo

Sprožilna naprava Accu-Chek FastClix je naprava za enostaven in neboleč odvzem kapilarne krvi iz prstnih blazinic. Sprožilna naprava ponuja 11 različnih nastavitev globine vboda, tako da globino vboda lahko prilagodite strukturi svoje kože. S pritiskom na sprožilni gumb lahko v enem samem koraku sprožilno napravo napnete in sprožite lanceto. Sprožena lanceta prebode kožo. V sprožilno napravo vstavite bobenček s 6 lancetami. Zbodeite se lahko 6-krat, vsakič z novo sterilno lanceto, nato pa je treba bobenček z lancetami zamenjati.

V teh navodilih za uporabo so naslednji 3 simboli:

- Ta simbol predstavlja **okolščine, ki bi lahko škodile vašemu zdravju ali povzročile poškodbo**.
- Ta simbol poudarja okolščine, ki lahko **poškodujejo sprožilno napravo**.
- Ta simbol poudarja **pomembne informacije**.

• **Sprožilna naprava Accu-Chek FastClix je samo za osebno uporabo!**
Za odvzem krvi jo lahko uporablja samo **ena** oseba.

Če sprožilno napravo uporabljajo tudi druge osebe, vključno z družinskimi člani, ali če jo zdravstveno osebje uporabi za odvzem krvi pri več kot eni osebi, obstaja nevarnost prenosa okužb. Zato ta sprožilna naprava ni primerna za profesionalno uporabo v zdravstvenih ustanovah.

• Sprožilno napravo, skupaj z vsemi njenimi sestavnimi deli, hranite nedosegljivo otrokom, mlajšim od 3 let. Zaužitje katerega od malih delov (npr. kapice ali podobno) lahko povzroči zadušitev.

V sprožilno napravo Accu-Chek FastClix vstavite samo bobenčke z lancetami Accu-Chek FastClix. Druge lancete ali bobenčki z lancetami lahko povzročijo nepravilno delovanje ali okvaro sprožilne naprave.

Priprava

- Pred odvzemom krvi si s toplo vodo in milom umijte roke (glejte ❶). Roke dobro osušite. To pomaga zmanjšati tveganje za okužbo vboodnega mesta in obenem spodbudi prekrvitev.

Vstavljanje bobenčka z lancetami

- Da lahko uporabite sprožilno napravo za odvzem krvi, je treba najprej vstaviti bobenček z lancetami.
- S sprožilne naprave snemite kapico (glejte ❷).
- V sprožilno napravo vstavite – z belim koncem naprej – nov bobenček z lancetami (glejte ❸).

Bobenček z lancetami je pravilno vstavljen, če je v celoti nameščen v sprožilno napravo in izstopa spredaj le še rob (glejte ❸).

Istočasno ne smete vstaviti bobenčka z lancetami v sprožilno napravo in pritisniti sprožilnega gumba ali nasloniti sprožilne naprave na sprožilni gumb, npr. na mizi. S tem lahko sprožite lanceto in se nenamerno zbudete.

- Ponovno natakните kapico. Zareza na robu kapice se mora ujemati z izbočenim izrisom oznake za globino vboda (srebrni kvadrat) (glejte ❹).

Kapica je pravilno natakljena, če je potisnjena do konca in se pri tem slišno zaskoči.

Kapico je mogoče z lahkoto namestiti do konca le tako, da je bobenček z lancetami v celoti vstavljen v sprožilno napravo. Pri nameščanju kapice ne uporabljajte prekomerne sile. Tako bi se kapica in sprožilna naprava lahko poškodovali. Namesto tega popravite namestitev bobenčka z lancetami.

V vsakem bobenčku z lancetami je 6 lancet. Prva lanceta je zdaj pripravljena za uporabo. V okencu, ki kaže število razpoložljivih lancet, je številka 6, kar pomeni, da imate na razpolago še šest lancet (glejte ❺).

Bobenčka z lancetami ne odstranite, dokler ne porabite vseh 6 lancet. Ko bobenček z lancetami enkrat odstranite, ga ne morete več ponovno vstaviti.

Nastavitev globine vboda

Globino vboda lahko nastavite na eno od 11 možnih nastavitev (od 0,5 do 5,5). Srebrni kvadrat (oznaka za nastavljen globino vboda) na sprožilni napravi označuje trenutno nastavljen globino vboda. Višja je številka, večja je globina vboda. Če to sprožilno napravo uporabljate prvič, priporočamo, da izberete nižjo nastavitve, npr. globino vboda 2.

- Vrčite kapico, dokler oznaka ne kaže na željeno globino vboda (glejte ❻).

Odvzem kapljice krvi

Na splošno je kri mogoče odvzeti iz vsakega prsta. Nekateri prsti pa so lahko neprimerni, na primer prsti z okužbo kože ali nohta. Priporočamo, da kapilarno kri odvezmete iz stranskih delov prstnih

blazinic, saj so ta mesta najmanj občutljiva za bolečino.

- Za vsak odvzem krvi uporabite novo lanceto. S tem zmanjšate možnost okužbe in omogočite skoraj neboleč odvzem krvi.
- Sprožilno napravo uporabljajte **le** z nameščeno kapico. Če kapica ni nameščena, lanceta zbode pregloboko in povzroči nepotrebno nelagodje.
- Redko se lanceta po odvzemu krvi ne umakne povsem v kapico. Če se tako izpostavljene konice lanceto dotaknete vi ali kdo drug, obstaja nevarnost poškodb in okužb. Če lanceta štrli iz kapice, sprožilno napravo **previdno** postavite na stran. Hranite jo zunaj dosega drugih oseb in se obrnite na Center za pomoč uporabnikom in servis.

- Sprožilno napravo čvrsto pritisnite na izbrano mesto vboda (glejte ❷).
- Pritisnite do konca na sprožilni gumb (glejte ❸).

Lanceta se sproži in vbode v kožo.

- Da spodbudite oblikovanje kapljice krvi, nežno masirajte prst v smeri proti prstni blazini.

Količina krvi, ki se pojavi na mestu vboda, je odvisna od nastavitve globine vboda in moči pritiska sprožilne naprave na prst.

Če ste pridobili premalo krvi, poskusite znova.

Sprožilno napravo tokrat pritisnite močnejše. Če krvi še vedno ni dovolj, ponovite postopek z nastavitvijo večje globine vboda.

- Če ste pridobili preveč krvi, zmanjšajte globino vboda.

- Takoj po odvzemu krvi izmerite raven glukoze v krvi skladno z navodili za uporabo merilnika.

Priporočamo, da potem mesto vboda zaščitite, da bo ostalo čisto.

Nameščanje nove lancete

Ko ste si s sprožilno napravo odvzeli kri, morate imeti za naslednji odvzem pripravljeno novo lanceto.

- Gumb na strani sprožilne naprave premaknite do konca v smeri **A** in nazaj v smeri **B** (glejte ❹).

Naslednja lanceta je zdaj pripravljena za uporabo. Okence poleg gumba kaže eno razpoložljivo lanceto manj, npr. 5 namesto 6.

- Vsako lanceto zamenjajte tako, kot je opisano v prejšnjem koraku.

Vsakič, ko je pripravljena nova lanceta, se število razpoložljivih lancet v okencu zmanjša za eno,

npr. s 4 na 3. Ko boste pripravili šesto, zadnjo lanceto, bo v okencu številka 1.

Zamenjava porabljenega bobenčka z lancetami

Ko ste porabili šesto, zadnjo lanceto, je treba porabljen bobenček z lancetami zamenjati z novim.

- S sprožilne naprave snemite kapico (glejte ❷).
- Izvelcite bobenček z lancetami iz sprožilne naprave (glejte ❹).

Če je bobenček z lancetami porabljen, je na belem valju rdeča črta.

- Vstavite nov bobenček z lancetami (glejte razdelek *Vstavljanje bobenčka z lancetami*).

Porabljen bobenček z lancetami ima vgrajen varnostni mehanizem, ki onemogoča ponovno uporabo.

Porabljen bobenček z lancetami lahko odvržete med gospodinske odpadke oziroma po predpisih, ki veljajo v državi, kjer živite.

Shranjevanje sprožilne naprave

Sprožilne naprave ne hranite pri visokih temperaturah, npr. v vročem avtu. To lahko vpliva na delovanje naprave.

Čiščenje in dezinfekcija sprožilne naprave in kapice


Da bi preprečili prenos okužb, morate redno čistiti in dezinficirati sprožilno napravo in kapico:

- vsaj 1-krat na teden,
 - če so na njih ostanki krvi,
 - vselej pred tem, ko kdo drug vzame v roke sprožilno napravo, na primer da bi vam pomagal.
- Uporabite krpe, ki ne puščajo vlaken in v katere sprožilno napravo lahko v celoti zavijete, ter vodo in 70-odstotni izopropanol.

Preden dezinficirate sprožilno napravo in kapico, ju morate najprej očistiti, da odstranite kri in drugo umazanijo.

- Sprožilne naprave in kapice ne potopite v tekočino.
- Za čiščenje uporabite samo vodo, za dezinfekcijo pa samo 70-odstotni izopropanol.

- S sprožilne naprave snemite kapico (glejte ❷).
- Za čiščenje naprave izvelcite bobenček z lancetami (glejte ❹).

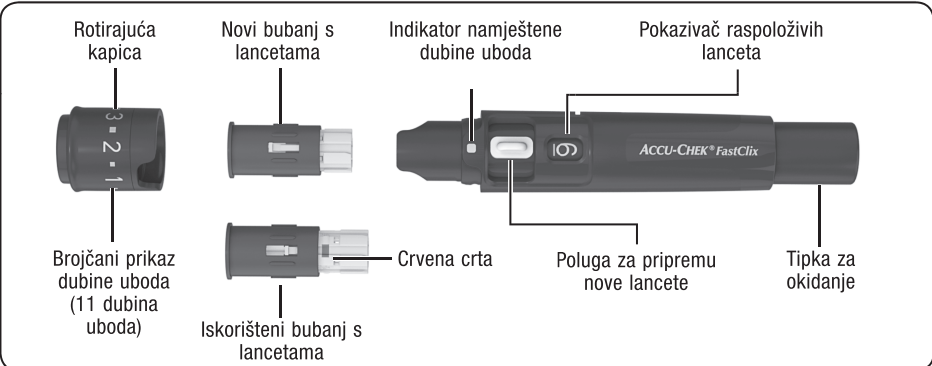

Upute za uporabo

Lancetar Accu-Chek FastClix je uređaj za jednostavno, gotovo bezbolno vađenje uzoraka kapilarne krvi iz jagodica prstiju. Lancetar omogućuje 11 različitih dubina uboda tako da se dubina uboda može prilagoditi stanju vaše kože. Pomoću tipke za okidanje možete u jednom koraku lancetar napeti i otpustiti lancetu. Prilikom otpuštanja lanceta probija kožu. Umetnite bubanj sa 6 lanceta u lancetar. Možete obaviti 6 vađenja krvi, svaki put sa sterilnom lancetom, nakon čega zamijenite bubanj.

U ovim uputama za uporabu naći ćete sljedeća 3 simbola:

- Ovaj simbol ukazuje na **moćnu opasnost od ozljede ili moćnu opasnost po zdravlje**.
- Ovaj simbol upozorava na postupke koji **bi mogli oštetiti lancetar**.
- Ovaj vas simbol ukazuje na **važne informacije**.

• **Lancetar Accu-Chek FastClix namijenjen je samo za osobnu uporabu!**
Njime se smije vaditi krvi samo **jedne te iste** osobe.

Kada lancetar zajednički koristi više osoba, čak i onda kada su to članovi iste obitelji, ili kada ih liječnik koristi za uzimanje uzoraka krvi od više različitih osoba, tada postoji rizik od prijenosa infekcije. Ovaj lancetar stizak nije prikladan za profesionalno korištenje u zdravstvenim ustanovama.

• Lancetar, uključivši i sve njegove dijelove, čuvajte izvan dosega djece mlađe od 3 godine. Ako se manji sastavni dijelovi lancetara (npr. kapice ili sl.) progutaju, postoji opasnost od gušenja.

U lancetar Accu-Chek FastClix umetnite samo bubanj s lancetama Accu-Chek FastClix. Druge vrste lanceta ili bubnja s lancetama mogu utjecati na rad lancetara ili ga oštetiti.

Priprema

- Prije vađenja krvi operite ruke toplom vodom i sapunom (vidi ❶). Dobro osušite ruke. Time se smanjuje mogućnost zagađenja mjesta uboda i pospješuje prokrvljenje.

Umetanje bubnja s lancetama

- Da biste s lancetaram mogli izvaditi krv morate u nj umetnuti bubanj s lancetama.
- Skinite kapicu s lancetara (vidi ❷).
- Umetnite novi bubanj s lancetama – s bijelim krajem naprijed - u lancetar (vidi ❸).

Bubanj s lancetama je pravilno umetnut kada je potpuno smješten u lancetaru i iz lancetara viri samo njegov rub (vidi ❸).

Kapica će lako sjesti do kraja ako je bubanj s lancetama potpuno smješten u lancetaru. Ne koristite silu kada postavljate kapicu. Time možete oštetiti kapicu i lancetar. Umjesto toga popravite položaj bubnja s lancetama.

- Ponovno postavite kapicu. Pritom se moraju udubljenje na rubu kapice i izbočenje na pokazivaču dubine uboda (srebrni kvadrat) uglaviti jedno u drugo (vidi ❹).

Kapica je pravilno postavljena kada sjedne do kraja tako da se čuje i osjeti kako se uglavila.

Kapica će lako sjesti do kraja ako je bubanj s lancetama potpuno smješten u lancetaru. Ne koristite silu kada postavljate kapicu. Time možete oštetiti kapicu i lancetar. Umjesto toga popravite položaj bubnja s lancetama.

Svaki bubanj sadrži 6 lanceta. Prva lanceta sada je spremna za uporabu. Pokazivač raspoloživih lanceta pokazuje brojku 6, što znači da je na raspolaganju 6 lanceta (vidi ❺).

Nemojte vaditi bubanj s lancetama prije nego iskoristite svih 6 lanceta. Nakon što ga jednom izvadite, bubanj s lancetama više ne možete vratiti u lancetar.

Namještanje dubine uboda

Možete namjestiti 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Srebrni kvadrat (indikator namješene dubine uboda) na lancetaru pokazuje namještenu dubinu uboda. Što je veći broj, to je veća i dubina uboda. Ako još nemate iskustva s ovim lancetom, preporučujemo da namjestite manju dubinu uboda, npr. dubinu uboda 2.

- Zakrenite kapicu do dubine uboda željene veličine prikazane na indikatoru dubine uboda (vidi ❻).

Vađenje kapljice krvi

Općenito govoreći krv se može vaditi iz bilo kojeg prsta. Neki prsti mogu biti neprikladni za vađenje krvi, npr. u slučaju infekcije kože ili nokta. Preporučujemo vađenje kapilarne krvi iz bočne strane jagodice prsta jer je taj dio najmanje osjetljiv na bol.

• Kod vađenja krvi svaki put koristite novu lancetu. Time se smanjuje rizik od infekcije, a vađenje krvi je gotovo bezbolno.

• Lancetar koristite **samo** ako je kapica na svom mjestu. Korištenjem lancetara bez kapice, lanceta će prodirjeti preduboko i ubod može biti bolan.

• U ponekim slučajima nakon vađenja krvi lanceta može izvirati iz kapice. Ako vi ili neka druga osoba dotaknu lancetu koja izviruje postoji opasnost od ozljede ili infekcije. Ako lanceta izviruje iz kapice lancetar **pažljivo** odložite sa strane. Čuvajte ga izvan dohvata drugih osoba i obratite se službi za podršku korisnicima.

- Čvrsto pritisnite lancetar na odabrano mjesto uboda (vidi ❷).
- Pritisnite tipku za okidanje potpuno do kraja (vidi ❸).

Lanceta je otpuštena i stvara ubod na koži.

- Nježno masirajte prst prema jagodici dok se ne pojavi kapljica krvi.

Količina krvi koju ćete dobiti ovisi o odabranoj dubini uboda i jačini pritiska lancetara na površinu kože.

Ako je dobivena količina krvi premala, pokušajte ponovo, ali ovoga puta lancetar jače pritisnite uz kožu. Ako još uvijek ne dobivate dovoljnu količinu krvi, ponovite postupak s većom dubinom uboda. Ako dobivate previše krvi, smanjite dubinu uboda.

- Izvršite mjerenje glukoze u krvi odmah nakon što ste izvadili krv prema uputama za uporabu vašeg aparata za mjerenje glukoze u krvi.

Nakon vađenja krvi preporučeno je zaštititi mjesto uboda kako biste ga održali čistim.

Priprema nove lancete

Nakon što se pomoću lancetara izvadili uzorak krvi, za sljedeće vađenje krvi potrebna vam je nova lanceta.

- Pomaknite polugu sa strane lancetara do kraja u smjeru **A** i opet u smjeru **B** (vidi ❹).

Nova lanceta sada je spremna za uporabu.

Pokazivač broja raspoloživih lanceta uz polugu sada pokazuje jednu lancetu manje, npr. 5 umjesto ranijih 6.

- Ponovite prethodno opisani postupak pri svakom mijenjanju lancete.

Nakon svake promjene lancete pokazivač raspoloživih lanceta pokazuje jednu lancetu manje, npr. sada 3 umjesto ranijih 4. Kada ste pripremili šestu, i time posljednju lancetu, pokazivač pokazuje 1.

Mijenjanje iskorištenog bubnja s lancetama

Kada ste upotrijebili šestu, tj. zadnju lancetu, potrebno je zamijeniti cijeli bubanj s lancetama novim.

- Skinite kapicu s lancetara (vidi ❷).
- Izvadite bubanj s lancetama iz lancetara (vidi ❹).

Kod iskorištenog bubnja s lancetama na bijelom cilindru vidljiva je crvena crta.

- Odmotnite novi bubanj s lancetama (vidi odlomak *Umetanje bubnja s lancetama*).

Iskorišteni bubanj s lancetama ima sigurnosni mehanizam koji onemogućuje ponovno umetanje bubnja.

Iskorišteni bubanj s lancetama možete zbrinuti s kućnim otpadom, ukoliko u vašoj zemlji to nije drugačije propisano.

Čuvanje lancetara

Nemojte čuvati lancetar na visokim temperaturama, npr. u zagrijanom automobilu. To može utjecati na njegovu funkciju.

Čišćenje i dezinfekcija lancetara i kapice

Da biste spriječili prijenos infekcije lancetar i kapicu morate redovito čistiti i dezinficirati:

- najmanje 1 tjedno,
- ako se na njima zadržala krv,
- prije nego li netko drugi uzme lancetar u ruke, npr. da bi vam pomogao.

Za to vam treba krpa koja ne ostavlja vlakna u koju možete u potpunosti umotati lancetar, voda i 70%-tni izopropanol.

Prije nego li dezinficirate lancetar i kapicu morate ih najprije očistiti kako biste uklonili kri i ostale nečistoće.

- Da se lancetar i kapica ne bi oštetili:
- Nikad ne potapajte lancetar i kapicu u tekućine.
- Za čišćenje koristite samo vodu a za dezinfekciju samo 70%-tni izopropanol.

- Skinite kapicu s lancetara (vidi ❷).
- Izvadite bubanj s lancetama iz lancetara (vidi ❹).

Čišćenje

- Z vodo rahlo navlažite krpo.
- Temeljito obrišite sprožilno napravo in kapico, sprožilno napravo le zunaj (glejte ❶), kapico pa zunaj in znotraj (glejte ❷).
- Sprožilno napravo in kapico obrišite še s suho krpo.

Dezinfekcija

- Krpo dobro navlažite s 70-odstotnim izopropanolom.
- Temeljito obrišite sprožilno napravo in kapico, vsako 2 minuti, sprožilno napravo le zunaj, kapico pa zunaj in znotraj.
- Ponovno natakните kapico.
- Sprožilno napravo v celoti zavijte v krpo.
- Sprožilno napravo pustite zavito 8 minut.
- Nato odvijte sprožilno napravo in počakajte, da se posuši na zraku.

Druga mjesta za uzimanje kapljice krvi

Kapilarnu krv namijenjenu za mjerenje glukoze u krvi možete izvaditi ne samo iz jagodica prstiju, već i iz drugih mjesta na tijelu (jastučica dlana, podlaktice, nadlaktice, lista ili bedra), takozvana mjerenja iz alternativnih mjesta na tijelu (engleski: Alternative Site Testing, skraćeno: AST). Da biste mogli kapilarnu krv vaditi iz drugih mjesta na tijelu morate običnu kapicu zamijeniti posebnom kapicom – AST-kapicom Accu-Chek FastClix.

Podaci za narudžnu

Ako želite naručiti lancetar Accu-Chek FastClix ili bubanj s lancetama Accu-Chek FastClix ili AST kapicu Accu-Chek FastClix, obratite se službi podrške za korisnike (vidi odlomak *Služba podrške za korisnike*).

Posljednja izmjena

2019-04

Služba podrške za korisnike

Hrvatska

Služba podrške za korisnike:
Besplatna telefonska linija: 0800 60 00 60

	Previdno, upoštevajte varnostna opozorila v priloženih navodilih za uporabo.
	Samo za enkratno uporabo
	Uporabno do
	Sterilizirano z izžarevanjem
	Proizvajalec
	Kataloška številka
	Številka serije
	Globalna trgovinska številka izdelka
	Izdelek izpolnjuje zahteve evropske direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

CE 0123

ACCUCHEK i FASTCLIX šta blagovni znakovi družbe Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



	Pozor, slijedite sigurnosne naputke u uputama za uporabu ovog proizvoda.
	Samo za jednokratnu uporabu
	Upotrebljivo do
	Sterilizirano pomoću radijacije
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Oznaka serije
	Globalni broj trgovačke jedinice
	Ovaj proizvod odgovara zahtjevima europske Direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.

CE 0123

ACCUCHEK i FASTCLIX su zaštitni znakovi tvrtke Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

