


Schéma prípravy a použitia infúzneho setu Accu-Chek® FlexLink


Accu-Chek® FlexLink infúzny set je určený pre subkutánnu infúziu inzulínu.

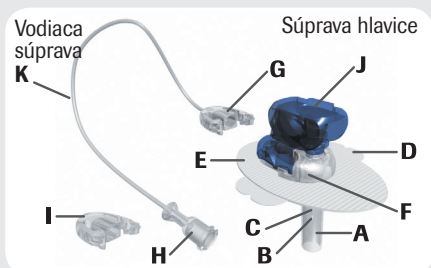


- A Ochranný kryt
- B Zavádzacia ihla
- C Jemná kanyla
- D Lepiaci vrstva
- E Samolepiaca podložka
- F Miesto pre kanylu
- G Prípojka
- H Prípojka typu Luer
- I Kryt počas odpojenia
- J Modrý uzáver
- K Hadička




1 Pred rozbalením infúzneho setu si dôkladne umyte ruky. Vyberte a dezinfikujte miesto zavedenia podľa pokynov Vášho lekára.

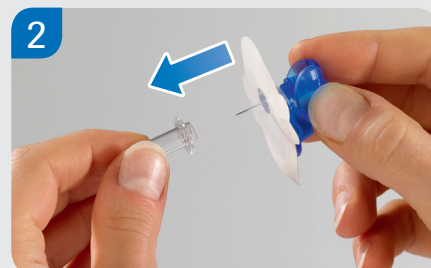


2 Otočte a vytiahnite priehľadný ochranný kryt.

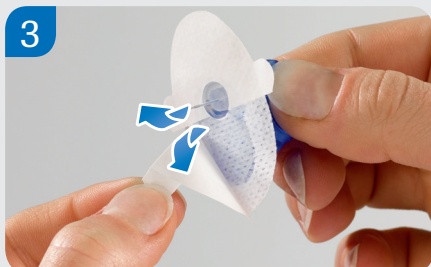


3 Odlepte obe časti ochrannej vrstvy od samolepiacej podložky.

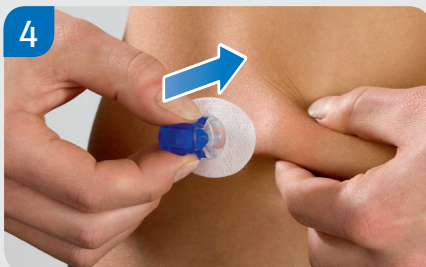


4 Vyberte miesto zavedenia mimo Vášho pásu, kostí, akýchkoľvek jaziev, pupka a nedávnych miest vpichu. Z podkožného tkaniva urobte kožnú riasu. Zaveďte infúzny set.

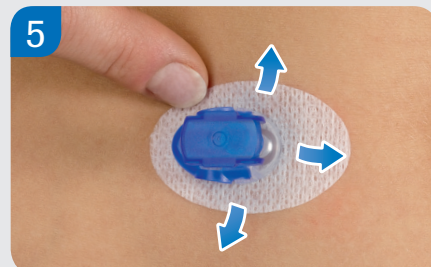


5 Dôkladne vyrovnajte samolepiacu podložku na koži, čím dosiahnete dobrý kontakt s kožou.

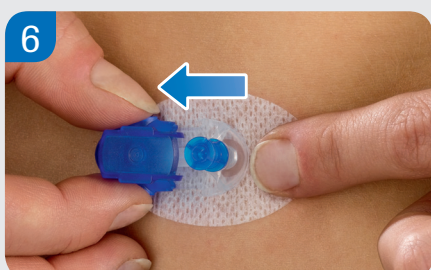

6 Držte samolepiacu podložku na mieste, jemne stlačte bočné úchytky modrého uzáveru a vytiahnite ho z miesta pre kanylu.

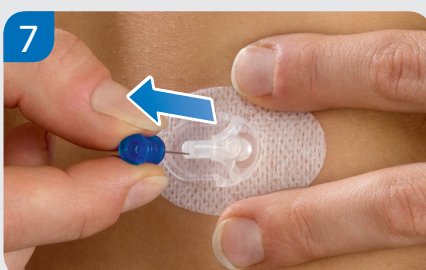

7 Podržte miesto pre kanylu pevne na tele. Vytiahnite zavádzaciu ihlu rovno pomocou držiadla zavádzacej ihly.

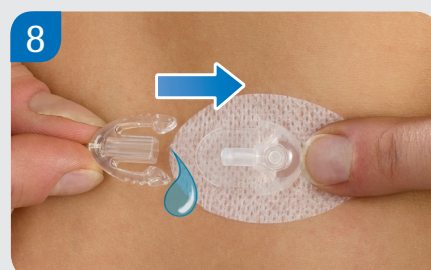

8 Pripojte vodiacu súpravu k novozavedenej súprave hlavice a naplňte prázdny priestor kanyly bolusom 1.0 jednotky (inzulínu U 100)

Kanyla	Dĺžka:	6 mm	8 mm	10 mm	
	Plniaci objem:	1,0 U*	1,0 U*	1,0 U*	
Hadička	Dĺžka:	30 cm 12 "	60 cm 24 "	80 cm 31 "	110 cm 43 "
	Plniaci objem:	6 U*	11 U*	14 U*	18 U*

* U 100 inzulín

Podrobné pokyny a bezpečnostné informácie nájdete v informácii, ktorá je súčasťou tohto produktu.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK sú ochranné známky spoločnosti Roche.
© 2012 Roche Diagnostics



www.accu-chek.sk
Roche Slovensko, s. r. o., Diagnostics Division
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

ACCU-CHEK®

Infúzny set Accu-Chek® FlexLink - praktický sprievodca



- Infúzna súprava s mäkkou kolmou (90°) kanylou.
- Podkožná časť kanyly: dĺžka 6, 8, 10 mm.
- Dĺžka vodiacej súpravy (hadičky) je podľa výberu 30, 60, 80 a 110 cm.
- Aplikácia kanyly je minimálne bolestivá manuálne alebo pomocou zavádzacej pomôcky.
- Manuálne zavádzanie je veľmi jednoduché a pohodlné pomocou modrého uzáveru (J), ktorý je dobre uchopiteľný a ktorého súčasťou je aj zavádzacia ihla (B). Pri správnom použití uzáveru neprichádza pacient do kontaktu s ihlou, ktorá je po použití a zložení uzáveru bezpečne uzatvorená v jeho vnútri a nepredstavuje ohrozenie v zmysle poranenia, prípadnej infekcie.
- Zavádzacia pomôcka **Accu-Chek LinkAssist** je praktickou pomôckou pri zavádzaní kanyly do podkožia.
Samotné zavedenie kanyly je veľmi rýchle a minimálne bolestivé. Je vhodné najmä pre pacientov, ktorí majú psychické zábrany pri manuálnej aplikácii alebo z dôvodu zvýšenej kožnej citlivosti.

Zavádzacia pomôcka Accu-Chek® LinkAssist je špeciálne určená pre použitie s infúznym setom Accu-Chek FlexLink a pomáha zabezpečiť úspešné a prakticky bezbolestné zavedenie.



- Rýchle, intuitívne a automatické zavedenie.
- Pomáha s umiestnením v ťažko dostupných miestach.
- Integrovaný bezpečnostný zámok pomáha zabrániť nechceným zavedeniam.
- Podkožná časť kanyly je veľmi jemná a pružná, prispôsobuje sa každému pohybu tela. Môže byť ľahko vnímaná pacientom tesne po aplikácii. Bolesť v mieste aplikácie je signálom nesprávneho zavedenia (zalomenie kanyly), prípadne začínajúcich zápalových zmien (zvyčajne druhý až tretí deň po aplikácii).
- **Odporúčaný interval výmeny kanyly Accu-Chek® FlexLink sú každé 2-3 dni (maximálne 72 hodín)**, a to aj v prípade vyrovnaných glykémii a absencií zápalových kožných zmien v mieste zavedenia.
- Plastová hlavica, z ktorej vychádza podkožná kanyla, je pohodlná, hypoalergénna a samopriľnavá (po aplikácii). Jej nízky profil (výška len 6,4 mm) prispieva k celkovej diskretnosti.
- Súpravy hlavíc sú balené buď samostatne alebo spolu s vodiacou súpravou (hadičkou). Pri výmene hlavice s podkožnou kanylou sa môže ponechať vodiaca súprava so zásobníkom, a to najmä v prípade, keď je v zásobníku ešte dostatočné množstvo inzulínu na niekoľko dní. Ušetríme tak čas a samozrejme aj inzulín.
- Vodiaca súprava (hadička), spájajúca podkožnú kanylu s inzulínovou pumpou, je ukončená plochým zaobleným krytom kanyly - prípojkou (G). Táto reverzibilná prípojka umožňuje veľmi rýchle a pohodlné spojenie podkožnej kanyly a vonkajšej hadičky. Pri spájaní hlavice a prípojky (G) nie je potrebné zložitý otáčanie. Pre toto spojenie je typické kliknutie, ktoré signalizuje, že došlo k správne mu a pevnému spojeniu.
- Vodiaca súprava (hadička) je veľmi jemná a pružná. Jej dĺžka je voliteľná individuálne podľa potreby pacienta (30, 60, 80 alebo 110 cm). Výber dĺžky hadičky zvyčajne určuje lokalizácia umiestnenia inzulínovej pumpy (pás, drieková oblasť, hrudník, rameno a iné), respektíve vzdialenosť medzi miestom zavedenia podkožnej kanyly a inzulínovej pumpy.
- Celkovo infúzna súprava Accu-Chek® Flexlink je ergonomicky prispôbena potrebám pacienta. Veľmi dôležitou vlastnosťou je diskretný vzhľad, jednoduché ovládanie a najmä bezpečnosť.

MUDr. Radovan Plášil

Diabetologická ambulancia, Martin - Vrútky



www.accu-chek.sk

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK sú ochranné známky spoločnosti Roche.
© 2012 Roche Diagnostics



Roche Slovensko, s. r. o., Diagnostics Division
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

ACCU-CHEK®